

احتیاط: په کیت کې هایډروکلوریک تیزاب (HCL) شتون لري. هایډروکلوریک تیزاب خطرناک وي، مهرباني وکړئ احتیاط کوئ. که چیرې هایډروکلوریک تیزاب ستاسو په څرمن ولگي، نو د ډبرو اوبو سره یې ومینځئ. مونږ سپارښتنه کوو چې د نمونې راټولولو پر وخت خوندي ساتونکي عینکې او خوندي ساتونکي دستکشې کاروئ.

1. تاسو به څه ته اړتیا لرئ؟

په دې کیت کې:

- د اوبو د نمونې د اخیستلو مالوماتي فورمه (کېم 202)
- درې د بنیښې بوتلګي (چې د هایډروکلوریک تیزابو لږ شان مقدار ولري، نو دغه بوتلګي مه کړوئ او مه یې تاوهئ)
- بوتلګي چې د "TRIP BLANK" لیبل ولري. پرانیږئ یې مه. دا کنټینر باید د نمونو سره بیرته ولېږل شي.
- سروونکي/لېږونکي د واورې د پیکونو سره. ډاډ ترلاسه کړئ چې د نمونې اخیستلو څخه دمخه د واورو پیکونه کنګل شوي وي.

په دې کیت کې شتون نه لري، خو د نمونې اخیستلو دپاره اړین دي:

- دستکشې او د سترګو خوندي ساتونکي کالي

2. چمتووالی ونیسئ

- د هغې ورځې په سهار کې نمونه ترلاسه کړئ چې استوئ یې.
- مخکې تر دې چې تاسو خپلې اوبه نمونه کوئ د واورو پیک (پیکونه) کنګل کړئ.
- که ستاسو څاه یا چینه په دې وروستیو کې بې مکروبه شوي وي، نو خپلې اوبه په تېزه وبهوه ترڅو د کلورینو بوی له منځه لاړ شي او بیا د نیسټ کولو څخه دمخه دوه ورځې انتظار وکړئ. که کلورین شتون لري نو ستاسو نمونه نه شي نیسټ کېدلی.
- په پاکو اوبو کې خپل لاسونه ومینځئ. پر هغه ورځ چې تاسو د خپلو اوبو نمونه اخلئ نو مه ګاز پمپ کوئ او مه کوم الوتونکي کېمیکل اداره کوئ. د خپلې نمونې اخیستلو څخه دمخه سینټایزر مه کاروئ. دا نیسټ د کېمیکلو دپاره حساسیت لري.
- خوندي ساتونکي عینکې او درستکلي واچوئ.
- د څښلو د اوبو هغه سرچینې ته لار شئ چې تاسو یې نیسټ کول غواړئ او د خپلې نلکې څخه سکرین لیرې کړئ، که چیرې وي. ډېری نلکې په خپله ځله کې سکرین لري، تاسو کولی شئ د نلکې د خلي څخه یې لیرې کړئ.
- اوبه تر 4-5 دقیقو وبهوه، د اوبو بهیر یوې نرۍ داري (8/1 اینچو) ته راټیټ کړئ ترڅو د اوبو څاڅکي او د هوا بریوکی محدود کړئ.
- د اوبو د نمونې د بوتل د سرپوښ دننه برخه یا څله مه لمس کوئ.

3. ترلاسه یې کړئ

- د هغې ورځې په سهار کې نمونه ترلاسه کړئ چې استوئ یې.
- سرپوښ لیرې کړئ او په ورو ورو بوتلګي ډک کړئ. د سرپوښ یا بوتلګي دننه برخه بل کوم څیز سره لمس کیدو ته مه پرېږدئ. بوتلګي له حده زیات مه ډکوئ او مه کنګالوئ ځکه چې دې سره به هغه پاوډر لیرې شي کوم چې دغه نمونه په بوتلګي کې دننه خوندي ساتي.

- اوبه وروچوئ ترڅو دا د بوتلگي له غاړې څخه لږ پورته وي (تصویر وگورئ). دا د هوا د جذب جوړېدو مخنیوي کې مرسته کوي. بوتلگي په کراره وټکوئ ترڅو د هوا بربوکی لیرې شي. د هوا بربوکی به ستاسو د نمونې د ټیسټ کولو مخه نیسي.

- سرپوښ په خوندي توگه وټرئ.

- د پاتې دوه بوتلگو دپاره د اخیستې گامونه تکرار کړئ.

- بوتلگي کاره کړئ او سرپوښ یې وټکوئ ترڅو د هوا د بربوکو کتنه وکړئ. د بیخ څخه دوه ځلي کتنه وکړئ. که تاسو د هوا بربوکی وینئ، نو بوتلگي خلاص کړئ او د اوبو یو څو نور څاڅکي ورته واچوئ ترڅو د دې سطحه د بوتلگي له غاړې څخه لږه پورته شي او سرپوښ په خوندي ټاو کړئ او ویئ ټرئ.

- که په لابراتوار کې د نمونې د ترلاسه کولو په وخت د هوا بربوکی شتون ولري، نو دغه نمونه نه شي ټیسټ کېدلی.

- بوتلگي مه تشوئ او بوتلگي له حده زیات مه ډکوئ. خوندي ساتونکي به له منځه لاړ شي او ستاسو نمونه به په سمه توگه ټیسټ نه شي.

- د اوبو د نمونې اخیستلو مالوماتي فورمه بشپړه کړئ، د هغې نېټې او وخت چې تاسو د اوبو نمونه اخیستې ده، ستاسو د نوم، پټي او برېښنالیک ادرس په گډون. د دې مالوماتو پرته ستاسو نمونې نه شي پروسیس کېدلی.

- که تاسو په خپلو اوبو کې د اوبو درملنه کاروئ نو په فورمه کې یې تشریح کړي (د نمونې په توگه: د اوبو نرمونکي).

- د نمونې پر بوتلگيو لېبلي ولگوئ ترڅو د خپلې اړوند فورمې سره سمون ولري (د نمونې په توگه: جان سمېټ، د پخلنځي لاسولونی).

4. بېرته یې ورکړئ

- د فریزر پیک (پیکونه) او د اوبو د نمونې کلک ټرل شوي بوتلگي په درکړل شوي کولر بوکسه کې کېږدئ.

- د اوبو د نمونې د اخیستلو بشپړ شوي مالوماتي فورمه په یوه بوکسه کې کېږدئ. مور وړانديز کوو چې فورمه په یوه بنده پلاستيکي کڅوړه کې کېږدئ چې لونده نه شي.

- خپله نمونه د روغتیا د څانگې لابراتوار ته د لاندې ورکړل شويو طریقو له لارې په 48 ساعتو کې دننه ورسوئ:

- نېغ په نېغه یې لابراتوار ته یې په دې ادرس ورسوئ South Park Drive, Colchester, Vermont 359 (د دوشنبې د ورځې څخه تر جمعي، د سهار 7:45 څخه تر د مازیگر 4:30).

- د روغتیا ځایي دفتر کې یې وسپارئ د ورونکي د وړلو د وخت څخه مخکې: دې سره ورکړل شوي پانه وگورئ کومه چې پټي او د وړلو وختونه لري. نمونې یوازې د دوشنبې د ورځې - د زیارت ورځې پورې منل کېږي.

- د FedEx یا UPS له لارې یې د شپې ولېږدوئ پر دې ادرس واستوئ

- 05446 South Park Drive, Colchester, Vermont 359 (د دوشنبې د ورځې څخه تر د پنجشنبې د ورځې پورې. د جمعي یا شنبې پر ورځ یې مه لېږدوئ، ستاسو نمونې به د ټیسټ کولو دپاره په وخت لابراتوار ته ونه رسېږي.

- پورې. د جمعي یا شنبې پر ورځ یې مه لېږدوئ، ستاسو نمونې به د ټیسټ کولو دپاره په وخت لابراتوار ته ونه رسېږي.

د ټیسټ پایلې به د نمونې له ترلاسه کولو څخه وروسته په 7 کاري ورځو کې درواستول شي.

د نورو مالوماتو دپاره، او د خپل څښاک د اوبو ټیسټ کولو په اړه د ویديو کتلو دپاره، وگورئ healthvermont.gov/water

